

Programat® P310

사용자 친화적인 퍼니스

경제적인 소성 성능.
최고 품질의 결과물.



역사상 가장 경제적인 Programat®

검증된

Ivoclar Vivadent의 소성 그리고 프레스 퍼니스들은 장기적인 성공에 기반을 두고 있습니다. 회사는 1976년 이래 안목이 있는 고객들을 위한 고품질 치과용 퍼니스를 제조해오고 있습니다. 이 퍼니스들은 전 세계의 치과 환경들에서 수천 번 검증되었습니다.

혁신적이고 비용 효율적인

Programat® P300에 기초해 개발된, 혁신적이고 비용 효율적인 Programat® P310은 수 많은 편리한 혁신들을 가지고 있습니다. 이들은 이 퍼니스를 훨씬 더 비용 효율적으로 만들어 줍니다.

훨씬 더 나은

- 커다란 냉각 트레이
- 통합된 소성 집게 홀더
- 상업적인 기공소를 위한 작동 모드
- 실버 테스트를 사용한 수동 온도 보정
- 다양한 관리 프로그램
- 300개의 개별적인 소성 프로그램
- 진공 변수 마법사 (VPW)



작동의 용이성으로. 새로운 기준을 설정.



작동의 용이

Programat P310은 뛰어난 사용자 편의성을 특징으로 가지고 있습니다. 원하는 프로그램이 고해상도 터치스크린이나 멤브레인으로 덮인 키패드로 빠르고 편안하게 선택될 수 있습니다. 메뉴는 명확하게 구조화 되어있고, 프로그램과 설정을 검색하기 위해 클릭으로 활성화되는 현대적인 아이콘들을 갖추고 있습니다.

OSD 디스플레이

색으로 구분되는 광학 상태 디스플레이 (OSD)는 퍼니스의 작동 상태에 대한 정보를 제공합니다. 상태 디스플레이는 먼 거리에서도 볼 수 있습니다.



모든 Ivoclar Vivadent 소성 프로그램들이 사전 설정되어 있고, 서로 다른 재료 그룹들로 구분되어 있습니다.

추가 하이라이트

SiC 기저부 반사장치를 갖춘 QTK2 머플 기술

SiC 기저부 반사장치를 갖춘 새로운 QTK2 머플 기술이 최적의 소성 결과를 위해 균일한 온도 분배를 보장합니다.



열 충격 보호 (TSP)

TSP 기능은 퍼니스 헤드가 너무 뜨거운 상태로 닫히는 경우 세라믹의 열 충격을 방지합니다.



이중-밸브 진공 기술

이 기능은 작동 중 펌프의 소음 수준을 줄입니다. 진공 펌프는 진공 호스와 소성실에서 수분을 증발시킵니다.



LAN과 USB 포트

퍼니스는 LAN과 USB 인터페이스를 사용해 프린터, USB 플래시 드라이브, 그리고 외장 하드 드라이브와 같은 다른 장치들에 연결될 수 있습니다. 소프트웨어 업데이트는 USB 플래시 드라이브에서 언제든지 다운로드 될 수 있습니다.



정전 보호 시스템

이 시스템은 프로그램의 중단 없이 최대 10초까지의 짧은 정전 시간을 연결합니다.



분리 가능한 퍼니스 헤드

분리 가능한 퍼니스 헤드에 의한 용이한 운송과 높은 유지 보수 편의성



이메일을 통한 원격 진단

진단된 데이터 파일이 버튼 하나를 눌러 생성될 수 있습니다. 이것은 상황을 즉시 처리할 서비스 센터들 중 하나로 이메일을 통해 편리하게 전송될 수 있습니다.



Programat®

성공의 스토리

경제적
효과적
미래 지향적



대기 키가 전기를 절약합니다

에너지의 효율적인 이용과 귀중한 자원의 책임 있는 사용: Ivoclar Vivadent는 이 목표에 최선을 다합니다. 따라서, Programat P310에는 새로운 파워 세이빙 기술이 장착되어 있습니다. 대기모드에서, 퍼니스의 전력소비는 거의 40퍼센트까지 떨어집니다. 그 결과, 전기요금을 절약하는 동시에 환경보호에 도움을 줍니다. 제품 뒷면의 파워 세이빙 기술 라벨을 찾아보십시오.

전기 절약은 쉬운 일입니다

간단히 파워 세이빙 키를 누르십시오: 퍼니스가 사용되지 않을 경우, 절전모드를 활성화하기 위해 간단히 파워 세이빙 키를 누르십시오.

기술 데이터

전원 공급	110 - 120 V, 50 - 60 Hz 200 - 240 V, 50 - 60 Hz 허용 전압 변동 $\pm 10\%$
최대 소비 전력	110 - 120 V에서 12 A 200 - 240 V에서 8.5 A
진공 펌프 데이터	최대 소비 전력: 250 W 최종 진공: < 50 mbar 테스트된 펌프만 사용하십시오
폐쇄된 퍼니스 치수	깊이: 455 mm 너비: 315 mm / 390 mm (냉각 트레이 포함) 높이: 315 mm
소성실 치수	직경: 90 mm 높이: 80 mm
최대 소성 온도	1200 °C
중량	15.4 kg
안전 정보	이 퍼니스는 다음의 기준에 따라 제작되었습니다: - IEC 61010 - UL 그리고 CAN/CSA
방사선 보호/ 전자기 호환성	EMC 테스트 완료

배송 형태

Programat P310

전원 코드
진공 호스
Programat 냉각 트레이
Programat SiC 소성 플레이트
Programat 소성 트레이 키트 2
온도 보정 세트
여분 퓨즈
USB 케이블
Programat USB 플래시 드라이브
Programat 액정 청소 천
소성 집게 홀더

권장 액세서리

(배송 형태에 포함되지 않음)

VP3 easy 또는 VP4 진공 펌프
집게



VP3 easy



VP 4





고정성 보철




Programat®는 “고정성 보철” 제품 범주의 일부를 구성합니다. 이 범주의 제품들은 고정성 보철 수복물의 제작에 관련된 과정들을 다룹니다 - 임시수복에서 수복물 관리까지. 제품들은 서로 최적으로 조직화되어 있으며 성공적인 과정과 적용을 가능하게 합니다.



이들은 이 범주의 추가적인 제품들입니다:

합금

비교될 수 없는 합금 선택

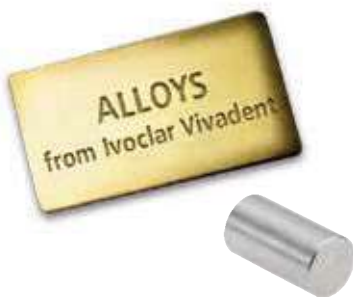

성능, 품질, 신뢰

- 현대 치과의 요구사항들에 맞춰진 광범위한 합금
- 세라믹 그리고 복합레진 축성 재료들과 이상적으로 조직화
- 치과용 합금에서 100년 이상의 경험

IPS InLine® System

다재다능한 메탈-세라믹



시스템을 사용한 성공

- 어떠한 적용에도 용이
- 빠르게 얻어지는 원하는 결과물
- 심미적으로 만족스러운 웨이드 효과

“고정성 보철” 범주의 제품들에 대해 더 많이 알고 싶으십니까? 추가 정보를 위해, 간단히 Ivoclar Vivadent의 담당자에게 연락하시거나 www.ivoclarvivadent.co.kr에 방문하십시오.

Ivoclar Vivadent Ltd.

서울시 서초구 서초동 1303-37
W-Tower 12층
Tel. 02 536 0714
Fax 02 596 0155
www.ivoclarvivadent.co.kr

설명과 데이터는 속성을 보장하지 않습니다.

Printed in Korea
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan / Liechtenstein
Korean version 2 prepared/0415 based on the English version
664380/2013-07-08/en

ivoclar
vivadent
passion vision innovation